

Kasutusjuhend

Ühekordne kolmekihiline näomask KUTEHEALTH

Ühekordseks kasutamiseks mõeldud kolmekihiline kummipaeltega näomask.

Pakis on 50 maski.
Suurus 175mm x 90mm.

Mõeldud ühekordseks ja lühiajaliseks kasutamiseks.

Tähelepanu! Tegemist ei ole meditsiinilise maski ega kaitsemaskiga!

Kasutamishüües

1. Enne maski puudutamist puhastage käed - peske käed vee ja seebiga või kasutage käte desinfitseerimisvahendit.
2. Veenduge milline on maski välimine külj ja tehke kindlaks, milline on maski ülemine serv (maski ülemises ääres on ninaklamber).
3. Asetage mask näole. Vormige ninaklamber tihedalt vastu nina. Veenduge, et mask kataks nina, suu ja lõua. Vältige maski puudutamist peale maski näole asetamist.
4. Pärast kasutamist eemaldage mask hoides maski kummipaeltest. Visake mask kohe pärast kasutamist ära prügikasti.
5. Pärast maski puudutamist või selle eest võtmist puhastage uuesti käed.

Säilitamine: Hoida kuivas toatemperatuuriga ruumis, kaitstuna otsese päikesevalguse eest.

Tootja: Qingdao Kutesmart CO. LTD, Redcollar 17, Qingdao linn, Jimo piirkond, Shandongiproovints, Hiina

Levitaja: Erimell AS, Viljandi mnt 73, Õssu küla, Kambja vald, Tartu maakond, 61713, tel 7400 455, info@erimell.ee