

Kasutusjuhend

Meditsiiniline kaitsemask NEOSURE

Ühekordseks kasutamiseks mõeldud kolmekihiline kummipaeltega kaitsemask.

Tüüp 1 (BFE \geq 95 %)

Pakis on 50 maski.

Suurus 175mm x 90mm.

Mõeldud ühekordseks ja lühiajaliseks (max. 4h) kasutamiseks.

Kasutamishüüsed

1. Enne maski puudutamist puhastage käed - peske käed vee ja seebiga või kasutage käte desinfitseerimisvahendit.
2. Veenduge milline on maski välimine külg ja tehke kindlaks, milline on maski ülemine serv (maski ülemises ääres on ninaklamber).
3. Asetage mask näole. Vormige ninaklamber tihedalt vastu nina. Veenduge, et mask kataks nina, suu ja lõua. Vältige maski puudutamist peale maski näole asetamist.
4. Pärast kasutamist eemaldage mask hoides maski kummipaeltest. Visake mask kohe pärast kasutamist ära prügikasti.
5. Pärast maski puudutamist või selle eest võtmist puhastage uuesti käed.

Säilitamine

Hoida kuivas toatemperatuuriga ruumis, kaitstuna otsese päikesevalguse eest.

Tootja: Qingdao Keter Medical Technology CO. LTD, A-2502, Darron Center, No. 180 Haier Road, 266100, Qinqdao, Hiina

Volitatud esindaja: 3A Inno UG, Eisfelder Str. 12, 96450, Coburg, Saksamaa

Levitaja: Erimell AS, Viljandi mnt 73, Õssu küla, Kambja vald, Tartu maakond, 61713, tel 7400 455, info@erimell.ee